

**! Unutmayın**

- ▶ **Enjeksiyon sadece haftada 1 kez yapılmaktadır.**  
Haftanın belirli bir gününde.
- ▶ Kalem şiringayı son kullanma tarihinden önce ve çözelti sarı ve berraksa kullanın.
- ▶ Çözelti içinde hava kabarcıklarının olması önemli değildir ve enjeksiyondan önce giderilmesine gerek yoktur.
- ▶ Bu enjeksiyon talimatı kullanım bilgilerinin yerine geçmez, kullanım bilgilerini dikkatlice okuyun.

Temassız otomatik  
enjeksiyonEnjeksiyon çözeltisi  
(miktar şekilden farklı  
olabilir)

Koruyucu başlık

Görünmeyen  
ince iğne

## Enjeksiyonun hazırlanması



- ▶ Ellerinizi iyice temizleyin.  
Hazır şiringayı ve alkollü tamponu hazır bulundurun.
- ▶ Enjeksiyon yerini seçin (altı karın bölgesi, göbek deliğine birkaç santimetre mesafede veya üst bacağın ön tarafı).
- ▶ Enjeksiyon yerini ekteki alkollü tamponla temizleyin.
- ▶ Her enjeksiyonda enjeksiyon yerini değiştirmeyi unutmayın.

## Enjeksiyonun yapılması

- ▶ Koruyucu başlığı düz biçimde çıkarın ve hazır şiringayı elinizde tutun.
- ▶ Enjeksiyondan önce turuncu renkli iğne korumasına dokunmayın.

- ▶ Baş parmağınız ve işaret parmağınızla temizlenen enjeksiyon yerinde cildi hafifçe sıkın.
- ▶ Kalem şiringayı 90° açıda turuncu iğne korumasıyla birlikte sıkışmış olduğunu cilt kısmına komple yerleştirin.
- ▶ Kalem şiringayı cildin içine aşağı doğru bastırın, enjeksiyon otomatik olarak bir „Klik sinyaliyle“ başlar.

- ▶ Kalem şiringayı cilde bastırmaya devam edin, ikinci bir „Klik sinyali“ geldiğinde enjeksiyon tamamlanmıştır.
- ▶ Sonra 3 saniye daha bekleyin.

- ▶ Kalem şiringayı yukarı kaldırın ve parmaklarınıza sıkışmış olduğunuzu cildi bırakın.
- ▶ İzleme penceresindeki yeşil gösterge enjeksiyonun tamamlandığını gösterir.
- ▶ İğne, kalem şiringada otomatik olarak kilitlenmiştir.



NORDiMET® hazır şiringanın kullanımıyla ilişki bir videoyu şurada bulabilirsiniz:  
[www.nordimet.de](http://www.nordimet.de)